

## Prosimo, upoštevajte naslednje:

1. POMEMBNO: Klop ne sme biti izsušen.
2. Če takrat, ko opazite klopa, nimate pri roki testa, lahko klopa shranite in ga zamrznete. Tako ostane pripravljen tudi za poznejše opravljanje testa.
3. Če ste klopa zamrznili, ga pred testom 10 minut tajajte pri sobni temperaturi.
4. Rezultat testa je viden po 10-ih minutah. Rezultat, ki se prikaže pozneje, ni uporaben.

Panakea, d.o.o  
Komenskega 14  
1000 Ljubljana



Tel. +386 1 430 08 25  
info@panakea.net

## Namen uporabe

Hitri test za odkrivanje borelije je imunološki test za hitro in kakovostno ugotavljanje prisotnosti bakterij borelije (*Borrelia* (B.) *garinii*, *Borrelia afzelii* in *Borrelia burgdorferi sensu stricto*) neposredno na klopu.

## Kako test deluje?

Povzročitelji borelioze vsebujejo posebne, značilne površinske proteine, ki so s testom za odkrivanje borelije imunološko dokazljivi.

## Zanesljivost

Občutljivost in zanesljivost testa je 98-odstotna.

## Za varno uporabo testa

- ◆ Test uporabljajte izključno na klopu.
- ◆ Testa ne uporabljajte po izteku roka trajanja.
- ◆ Za vsak test uporabite novo pipeto.
- ◆ Vsak test je uporaben le enkrat.

## Vsebnost

- ◆ Testna epruveta s testno raztopino
- ◆ Testna kaseteta
- ◆ Pipeta in plastična paličica, navodila

## Shranjevanje

Hitri test in reagente lahko hranite pri sobni temperaturi ali v hladilniku.

## Info

www.panakea.net  
www.zeckenschnelltest.de

# Kloptest

Test za odkrivanje borelije, za domačo uporabo

## Borelija




– Navodila za uporabo –

## Odstranjevanje klopa

Prenos okužbe je v večini primerov odvisen od tega, kako dolgo je bil klop prisenan. Zato je pomembno, da klopa odstranite takoj, ko ga opazite.


Primer, kako odstraniti klopa:

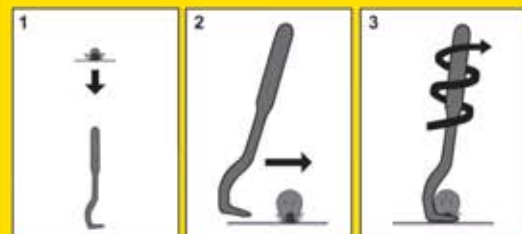

1. Vzemite v roke kaveljček za odstranjevanje klopov.
2. Kaveljček za odstranjevanje klopov potisnite pod klopovo glavo.
3. Kaveljček zasučite 2-do 3-krat: klopa enostavno izvlecite iz kože, brez strahu, da bi del klopa ostal v rani.

## Opravljanje testa

-1-  
Klopa v epruveti zmečkajte s plastično paličico.

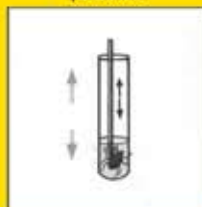

-2-  
S pomočjo pipete izsesajte vzorec.



-3-  
Nanesite 4-5 kapljic na okroglo testno odprtino na testni kaseti.



## Rezultat testa

Negativen (slika 1):

Na kontrolnem področju »C« se po 2 – 3 minutah prikaže rdeča črta. Na testnem področju »T« po 10-ih minutah ni vidna rdeča črta. Borelije niso dokazljive.

Pozitiven (slika 2):

Po 10-ih minutah se na obeh področjih »T« in »C« pojavita rdeči črti. Ta rezultat dokazuje borelijo v vzorcu.

*Takoj poiščite zdravniško pomoč. Po dogovoru z zdravnikom boste začeli ustrezno terapijo proti boreliozi.*

Test ni veljaven (slika 3):

Če se v 10-ih minutah rdeča črta ne pojavi ne na kontrolnem področju ne na testnem področju, je preizkus neveljaven. Prosimo, da reklamacijo sporočite proizvajalcu oziroma lekarni, kjer ste izdelek kupili.

## Rezultat v 10-ih minutah

Na rezultat je treba čakati 10 minut in ga nato primerjati s spodaj navedenimi rezultati.

(slika 1):



Negativen

(slika 2):



Pozitiven

(slika 3):



Test ni veljaven

